

Телесфор 55

pH 8,2+2,0



Альтсепт Экспресс

pH 7,0



Состав:

ЧАС+АМИН+ПГМГ – 55%, ПАВ, ферментный комплекс (целлюлаза, липаза, амилаза, протеаза, маннаназа). Дезинфекция и мойка поверхностей, воздуха, биовыделения, медотходы, скорлупа яиц, кувезы, ПСО + дезинфекция ИМН (включая эндоскопы). Микробиология: бактерии (грам+ и грам-, включая возбудителей туберкулеза, тестировано на *Mycobacterium terrae*), вирусы (включая коронавирус в том числе «атипичной пневмонии», SARS, SARS-CoV-2 (в том числе штаммов Альфа, Бета, Гамма, Дельта, Омикрон, ВБИ, ООИ, анаэробные инфекции, грибковые инфекции, овоцидная, спороцидная и ларвицидная активность.

Состав:


В качестве действующих веществ содержит изопропиловый спирт (2-пропанол) -75%, хлоргексидина биглюконат – 0,5%, а также функциональные добавки, увлажняющие и ухаживающие за кожей компоненты.



Основные режимы	% / время экспозиции
Дезинфекция поверхностей (бактерии)	0,005% / 60 мин (20 000 л)
Дезинфекция поверхностей (вирусы)	0,005% / 60 мин (20 000 л)
Генеральная уборка соматических и хирургических отделений	0,02% / 15 мин (5000 л)
ПСО ИМН, совмещенная с дезинфекцией	0,02% / 30 мин (5000 л)
Дезинфекция жестких и гибких эндоскопов, совмещенная с ПСО	0,04% / 30 мин (2 500 л)

Преимущества:

- + За счет наличия ферментного комплекса легко смывает фиксированные загрязнения и биологические субстраты с любых поверхностей и инструментов
- + Надежное средство в борьбе с внутрибольничными инфекциями
- + Высокоэкономичное средство
- + Широкий спектр антимикробной активности и различные классы соединений в качестве действующих веществ обеспечивают длительное развитие резистентности патогенов

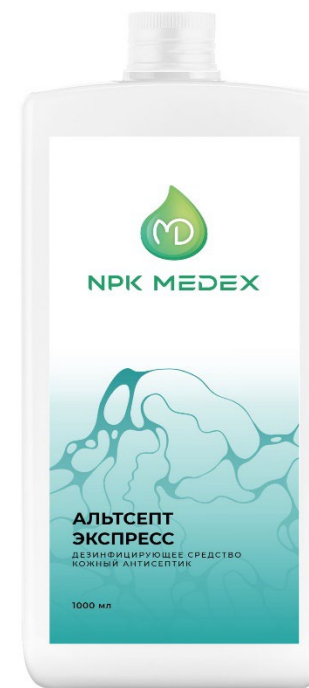

Готовый к применению прозрачный бесцветный раствор или прозрачный раствор от светло-зеленого до зеленого с запахом отдушки

Спектр активности:

Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамположительных, включая возбудителей туберкулеза (тестировано на *Mycobacterium terrae*) и грамотрицательных (кишечная палочка, синегнойная палочка) бактерий, противовирусной активностью (в отношении возбудителей ЕСНО 6 (группа вирусов полиомиелита)) и фунгицидной активностью.

Обладает пролонгированным действием не менее 5 часов.

Режимы применения:

Гигиеническая обработка рук – 3 мл/30 сек

Обработка рук хирургов – 5 мл/2,5 мин (двукратно)

Обработка операционного поля – 2 мин

Обработка инъекционного поля – 30 сек

Экспресс-дезинфекция поверхностей (вирусы) – 1 мин

