


Эспокан

Устройство для комбинированной спинально-эпидуральной анестезии (КСЭА)

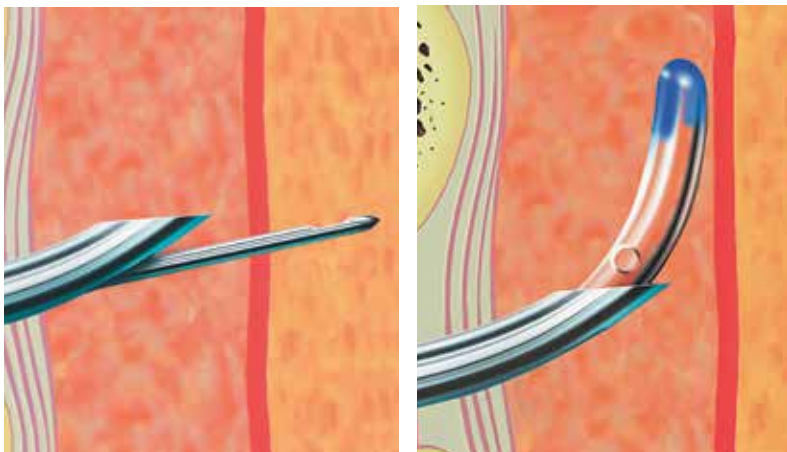


Комбинированная спинально-эпидуральная анестезия сочетает достоинства и преимущества спинальной и эпидуральной методик.

Быстрое развитие мощного блока с возможностью продленной анальгезии при применении односегментной методики пункции стало возможным благодаря продуманной конструкции специализированных игл наборов Эспокан.

Специализированная игла Туохи с дополнительным боковым отверстием на кончике и спинальная игла с пластиковым центровочным покрытием

- боковое отверстие в игле Туохи для выхода спинальной иглы
- система фиксации спинальной иглы в павильоне иглы Туохи
- специальное покрытие спинальной иглы в виде пластиковой муфты для точной центровки и стабилизации в просвете иглы Туохи


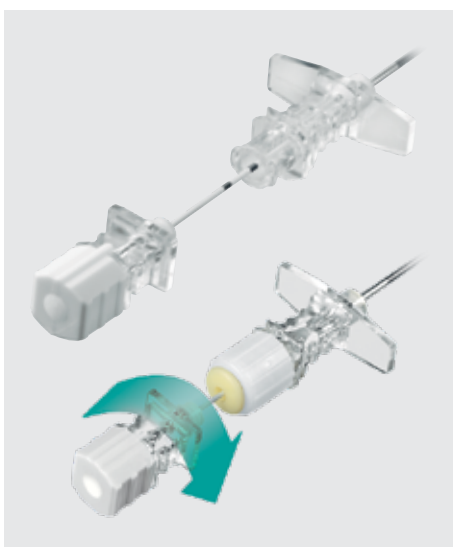


Разметка спинальной иглы

Метки на пластиковой центровочной муфте спинальной иглы соответствуют моменту выхода ее кончика из бокового отверстия иглы Туохи


Система фиксации спинальной иглы


Система фиксации позволяет ротировать иглу в зафиксированном положении для удобного захвата павильона пальцами. Предотвращает смещение спинальной иглы в просвете иглы Туохи после успешной пункции твердой мозговой оболочки и введении анестетика

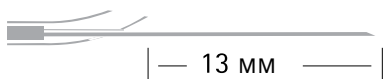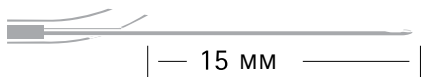

Оптимальный вылет спинальной иглы за кончик иглы Туохи для гарантированной пункции ТМО:

- 15 мм для иглы с карандашной заточкой
- 13 мм для иглы типа Квинке

| Набор Эспокан без системы фиксации спинальной иглы | Размер (G) | Наружный диаметр × длина (мм) | Шт. в уп. | Артикул |
|---|---|-------------------------------|-----------|---------|
|  | Спинальная игла Спинокан | | | |
| | 27 | 0,42 × 125,5 | 10 | 4556674 |
| | Спинальная игла Пенкан | | | |
| | 27 | 0,42 × 127,5 | 10 | 4556666 |
| | Состав набора | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Перификс стандартный катетер, 3 боковых отверстия ▪ Перикан эпидуральная игла с дополнительным отверстием на изгибе кончика 18G 1,3 × 88 мм ▪ Перификс LOR шприц «потери сопротивления», Люэр, 8 мл ▪ Перификс плоский антибактериальный фильтр ▪ Перификс ПинПэд фиксатор фильтра ▪ Перификс коннектор катетера | | | |

| Набор Эспокан с системой фиксации спинальной иглы | Размер (G) | Наружный диаметр × длина (мм) | Шт. в уп. | Артикул |
|---|---|-------------------------------|-----------|---------|
|  | Спинальная игла Спинокан | | | |
| | 27 | 0,42 × 136,5 | 10 | 4556747 |
| | Спинальная игла Пенкан | | | |
| | 27 | 0,42 × 138,5 | 10 | 4556763 |
| | Состав набора | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Перификс Софт Тип катетер, 3 боковых отверстия ▪ Перикан эпидуральная игла с дополнительным отверстием на изгибе кончика 18G 1,3 × 88 мм ▪ Фиксатор спинальной иглы в павильоне иглы Туохи ▪ Перификс LOR шприц «потери сопротивления», Люэр, 8 мл ▪ Перификс плоский антибактериальный фильтр ▪ Перификс ПинПэд фиксатор фильтра ▪ Перификс коннектор катетера | | | |