


АППАРАТЫ МЕХАНИЧЕСКИЕ С РАЗБОРНЫМ ШТОКОМ

- Длина штока: 50, 150, 250 мм
- Длина шва: 30, 45, 60 мм
- Вращение штока 360°
- Артикуляция кассеты 45°
- 8 прошиваний в рамках одной операции
- Аппараты поставляются без предустановленной кассеты



Варианты длины штока

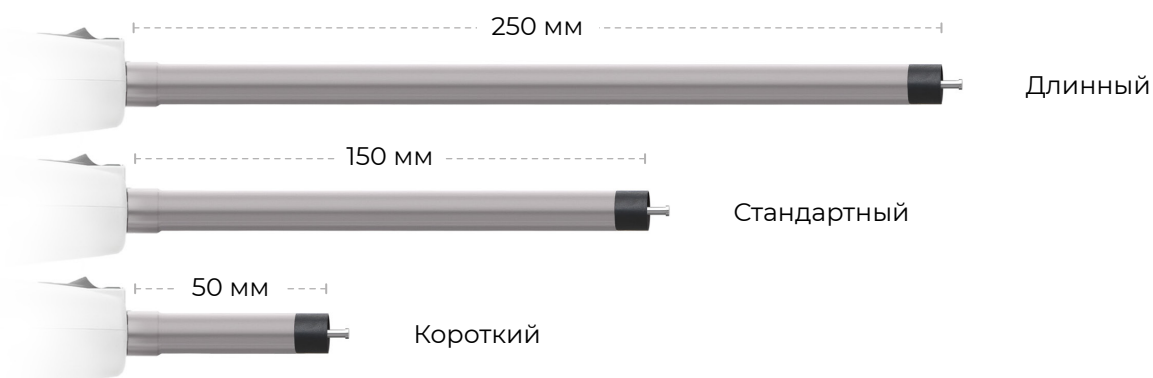


КАССЕТЫ К АППАРАТАМ СШИВАЮЩИМ МЕХАНИЧЕСКИМ С РАЗБОРНЫМ ШТОКОМ

Одноуровневые



Привычный вариант исполнения

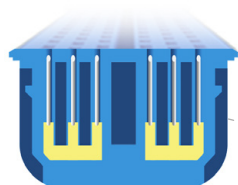


6 рядов скоб, расположенных в шахматном порядке



Трёхуровневые



Разная высота скоб до и после прошивания позволяет создавать шов в более широком диапазоне толщины

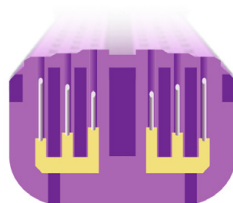

Клювовидные кассеты применяются при операциях в труднодоступных местах.

Размерный ряд

REF аппарата	Цвет и REF кассеты	Длина шва, мм	Высота открытой скобы, мм	Высота закрытой скобы, мм	Подходящий диаметр троакара, мм
1847-VES-B 1847-VEM-B 1847-VEL-B	Кассеты с одноуровневым накладыванием скоб				
	<input type="checkbox"/> 1847-VEAFS30W-B	30	2,5	1,0	12
	<input type="checkbox"/> 1847-VEAFS45W-B	45	2,5	1,0	12
	<input checked="" type="checkbox"/> 1847-VEAFS45B-B	45	3,8	1,5	12
	<input checked="" type="checkbox"/> 847-VEAFS45G-B	45	4,5	2,0	15
	<input type="checkbox"/> 1847-VEAFS60W-B	60	2,5	1,0	12
	<input checked="" type="checkbox"/> 1847-VEAFS60B-B	60	3,8	1,5	12
	<input checked="" type="checkbox"/> 1847-VEAFS60G-B	60	4,5	2,0	15
	Кассеты с трёхуровневым накладыванием скоб				
	<input checked="" type="checkbox"/> 1847-VEAT45T-B	45	2,0/2,5/3,0	0,88-1,5	12
	<input checked="" type="checkbox"/> 1847-VEAT45P-B	45	3,0/3,5/4,0	1,5-2,25	12
	<input checked="" type="checkbox"/> 1847-VEAT45B-B	45	4,0/4,5/5,0	2,25-3,0	15
	<input checked="" type="checkbox"/> 1847-VEAT60T-B	60	2,0/2,5/3,0	0,88-1,5	12
	<input checked="" type="checkbox"/> 1847-VEAT60P-B	60	3,0/3,5/4,0	1,5-2,25	12
	<input checked="" type="checkbox"/> 1847-VEAT60B-B	60	4,0/4,5/5,0	2,25-3,0	15
	Кассеты с трёхуровневым накладыванием скоб клювовидные				
	<input checked="" type="checkbox"/> 1847-VEART45TC-B	45	2,0/2,5/3,0	0,88-1,5	12
	<input checked="" type="checkbox"/> 1847-VEART60TC-B	60	2,0/2,5/3,0	0,88-1,5	12
<input checked="" type="checkbox"/> 1847-VEART60PC-B	60	3,0/3,5/4,0	1,5-2,25	12	

Способ применения аппаратов механических с разборным штоком



1. Выберите необходимый тип кассеты.
2. Потяните за предохранитель кассеты, чтобы его снять.
3. Вставьте кассету в шток эндоскопического линейного сшивающего аппарата в положение «стрелка к стрелке».
4. Потяните кассету к аппарату по часовой стрелке до щелчка. Кассета установлена.
5. Нажмите на рукоять. Бранши кассеты закрыты. Аппарат готов к погружению в троакар.
6. Погрузите сшивающий аппарат в троакар до полного выхода бранши кассеты из канюли.
7. Потяните рычаг (a) на себя на индикаторе прошивания для открытия кассеты.
8. Отрегулируйте угол кассеты с помощью рычага (b) на рукоятке. Максимальный угол изгиба 45° достигается в положении рычага перпендикулярно штоку.
9. Расположите ткань между браншами кассеты.
10. Однократно нажмите на рукоять, чтобы зафиксировать ткань.
11. Нажмите на зелёную кнопку предохранителя. Аппарат готов к работе.
12. Сожмите рукоять повторно и прошейте ткань. Количество нажатий зависит от длины кассеты. Каждое нажатие прошивает 15 мм ткани.
13. Отведите индикатор длины шва (a) на себя до упора. Бранши кассеты откроются.
14. Перед изъятием кассеты из троакара, с помощью рычага (b) верните кассету в нейтральное положение.
15. Сожмите рукоять (c), чтобы сомкнуть бранши.
16. Извлеките сшивающий аппарат из троакара.
17. Для отсоединения кассеты от аппарата отведите индикатор длины шва на себя до упора. Бранши кассеты откроются.
18. Отведите чёрный ползунок, расположенный на ротационном колесе, на себя. Поверните кассету против часовой стрелки. Кассета будет отсоединена от аппарата.

